




**AIGENER**  
FUTURE OF MEDICINE

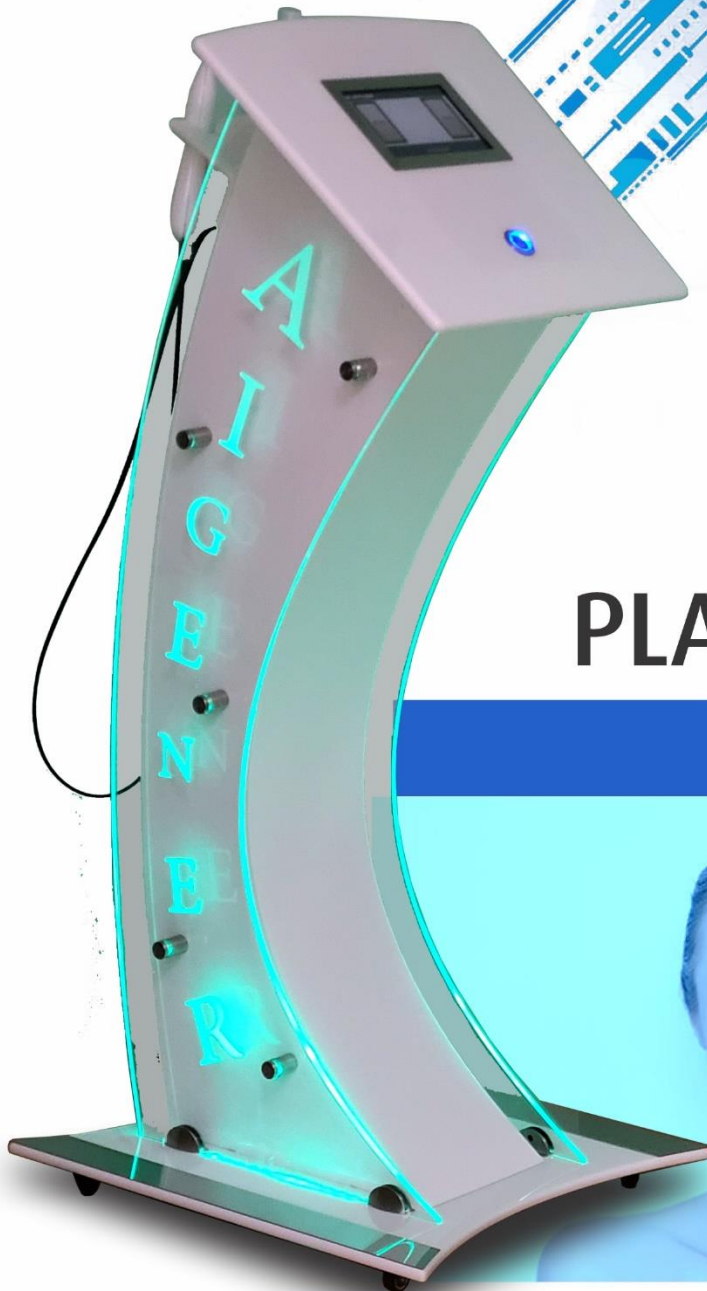

# PLASMA JETT

DSP-950



## دستگاه پلاسماجت چیست؟

دستگاه پلاسماجت که از آن تعبیر به دستگاه لیفت بدون جراحی می شود از جدیدترین تکنولوژی های روز دنیا است که از روش های غیر تهاجمی برای جوان سازی و رفع افتادگی پوست استفاده می کند.

## ویژگی های دستگاه پلاسماجت مدل DSP-۹۵۰ شرکت B.K.G چیست؟

دستگاه پلاسماجت مدل DSP-۹۵۰ یک دستگاه پلاسما فرکشنال با قابلیت های فراوان می باشد. این دستگاه با بهره مندی از منوهای متعدد، پلاسماجت و پلاسما DBD و همچنین با برخورداری از محیطی کاربر پسند به کمک ال سی دی لمسی (تاچ اسکرین) در زمینه پوست و زیبایی و درمان کارایی دارد. وجود منوهای متنوع امکان انتخاب اتوماتیک توان کاری دستگاه در درمان های مختلف را فراهم می سازد که این مزیت موجب حداقل سازی خطای انسانی در فرآیند درمانی به کمک دستگاه مذکور می شود. درمان افتادگی پلک، چین و چروک های سطحی، فیبروماس ها، زانتالاسما، آکنه، اسکارها و استرچ مارک ها، با استفاده از پلاسماجت میسر می گردد. و با استفاده از DBD پلاسما می توان درمان بی اختیاری ادرار، زخم های دهانه رحم، عفونت های پس از عمل بخصوص سزارین و یا هر عمل دیگر را درمان نمود. همچنین DBD پلاسما در کمک به درمان شقاق ناحیه آئال و هموروئید نیز کاربرد دارد. در نهایت با استفاده از دستگاه دی بی دی پلاسما می توان برای کنترل و بهبود عوارض ناشی از ویروس HPV کمک گرفت.

## عملکرد دستگاه پلاسماجت به چه صورت است؟

این دستگاه مبتنی بر مولد شار الکترونی است که از طریق ایجاد اختلاف ولتاژ تا ۵۰۰۰ ولت است و یونیزه کردن گاز مابین پراب دستگاه و بدن انسان کار می کند. با اعمال شار الکترونی بر موضع مورد نظر در بدن، بر غشای سلولی و پمپ سدیم-پتاسیم تاثیر گذاشته و با کنترل این شار در چندین سطح مختلف، نه تنها برای رفع افتادگی پلک (بلفاروپلاستی) بلکه درمان هایی نظیر رفع ضایعات عروقی (تلائنکتازی و همانژیوم) کارایی داشته که به جای استفاده از لیزر و دوره درمان طولانی، وظیفه برداشتن اسکین تگ، خال و یا وارت را بدون ایجاد دوده های سمی را انجام داده و موجب جوانسازی، لیفت، رینکل ریمووال و رفع سیاهی زیر چشم می شود.



## عوارض جانبی دستگاه پلاسماجت مدل DSP-۹۵۰ چیست؟

عوارض جانبی درمان با دستگاه شامل التهاب و برافروختگی ناحیه مورد نظر است که ممکن است دو تا سه روز بطول بیانجامد. این عوارض برای نواحی اطراف چشم ممکن است تا ده روز طول بکشد و تورم ناشی از آن نیز چندین روز باقی بماند. خوابیدن با چند بالش اضافی برای بالا نگه داشتن سر می تواند کمک مناسبی در این مرحله باشد. همچنین پوسته پوسته شدن و یا ایجاد دلمه های نقطه مانند کوچک روی پوست از دیگر مواردی هستند که می توانند از یک هفته تا ده روز باقی خواهد ماند. آنچه که در این دوران بسیار حائز اهمیت است این است که اجازه دهید پوسته ها بدون دخالت ناپدید شوند و با دست سعی در مالش روی سطح پوست جهت برداشتن آن ها ننمائید.

## دستگاه پلاسماجت مدل DSP-۹۵۰ برای چه کسانی مناسب نیست؟

کسانی که:

- ✓ باطری قلب (پیس میکر) دارند.
- ✓ افرادی که باردار هستند.
- ✓ مبتلا به صرع هستند.
- ✓ مبتلا به سرطان هستند.
- ✓ شرایط التهابی حاد دارند.

در زمره افراد واجد شرایط برای بهره مندی از خدمات این دستگاه نیستند.

## تعداد درمان هایی مورد نیاز با این دستگاه چقدر است؟

لیفت چشم بدون نیاز جراحی و جوانسازی پوست معمولاً فقط یک یا دو جلسه طول خواهند کشید تا نتیجه مطلوب حاصل شود. فقط پس از یک جلسه خواهید دید نتایج اولیه بطور قابل توجهی محسوس بوده و در صورت ادامه فرآیند درمانی در ماههای آتی می توان مشاهده نمود که حتی نتیجه بلند مدت آن ممکن است تا ۵ سال ادامه یابد. برداشتن خال، زگیل و تگ پوستی نیازمند به یکبار استفاده از این دستگاه است.

نمونه هایی از درمان هایی که بوسیله دستگاه پلاسماجت حاصل شده اند:

