

اقتباس شده از صنعت هوانوردی

درمان های پوستی غیر تهاجمی



JETPEEL

JET PEEL HITECH TREATMENT
Glowing - Brightening | Reduce Wrinkles - Acne Scar

JETPEEL


رنج وسیعی از درمان‌های درماتولوژی و کازمتیک

اقتباس گرفته شده از صنعت هوانوردی

بدون سوزن بدون درد و غیرتهاجمی

بدون اسکار و کمترین نقاوت

دستگاه JetPeel بر اساس تکنولوژی هوای فشرده با سرعت بالا اولین دستگاه انتقال مواد به لایه های پوستی بدون استفاده از سوزن می باشد (مزوتراپی بدون سوزن). فناوری فشار جت JetPeel اولین رویکرد در جهان برای مزو تراپی بدون سوزن از طریق اپیدرمی است که مسائل رایج و مشکلات در درمان های پوستی و زیبایی را به صورت غیر تهاجمی انجام می دهد. دستگاه جت پیل بر اساس فناوری های اقتباس شده از صنعت هوانوردی، نتایج بالینی بسیار موثری در جهت رفع لک بستن منافذ باز، لیفت و ماساژ پوستی را به ارمغان می آورد. دستگاه جت پیل با تولید هوای فشرده محلول موجود در دستگاه را با تبدیل به ذرات مه آلود نموده که به آن جت استریم می گویند. این جت استریم ها، با سرعت بیش از ۵۰۰ متر بر ثانیه، توسط هندپیس JetPeel بر روی سطح پوست اعمال می شود.

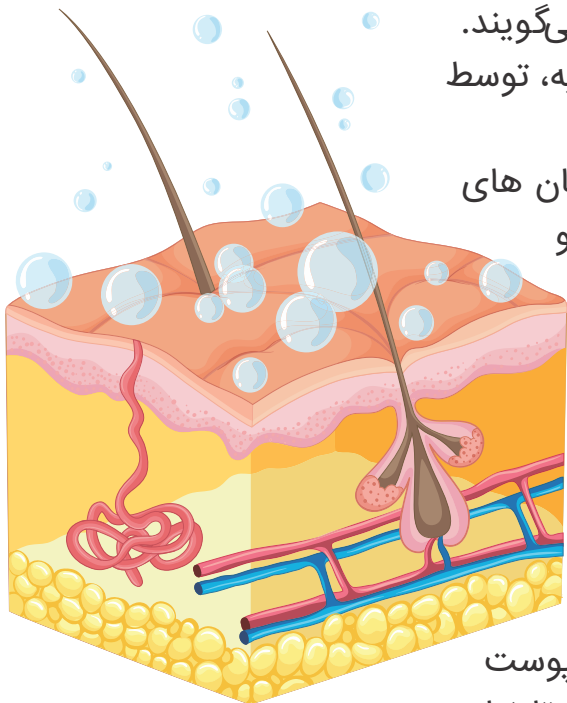

هنگامی که هندپیس بر روی پوست حرکت می کند جریان های جت مایع پیوسته تولید میکند که یک ماساژ لنفاوی و به دنبال آن لایه برداری از اپیدرم را موجب می گردد. جت استریم ها بدون سوزن و بدون هیچ گونه درد ناراحتی یا خراش در پوست، میکرو کانال هایی را باز میکنند که مسیر مستقیمی به لایه های عمیق تر پوست ایجاد می نماید. با استفاده از دستگاه جت پیل همراه با فرمول های اختصاصی Jet Care که برای درمان مشکلات پوستی مختلف طراحی شده اند، ریز قطرات مغزی زیر سطح پوست حرکت میکنند و بر روی لایه های پوست اثر می گذارند تا نتایج و تکسین قابل توجهی را ارائه دهند.

handpieces

هندپیس Jetpeel یک فناوری پیشرفته است که امکان ارسال جریان های جت مه آلود ریز را با سرعت بالا به عمق لایه های پوست به روشی ایمن و موثر فراهم می کند. نازل مخصوص هندپیس Jetpeel برای شکستن جت های مایع شتاب گرفته به قطرات میکرو طراحی شده است. مکانیزم عمل به این صورت می باشد که پوست را بدون درد یا ناراحتی کشیده و میکروکانال ها را به عمق لایه های پوست انتقال می دهد، ریز قطرات از نازل هندپیس خارج می شوند و بدون سوزن ، بدون برش وارد پوست می گردند. این بدان معنی است که نتایج آنی و موثر برجای دارد.



”





عمیقتر، نرم تر، کارآمد تر





راهنمای منوها

صفحه لودینگ

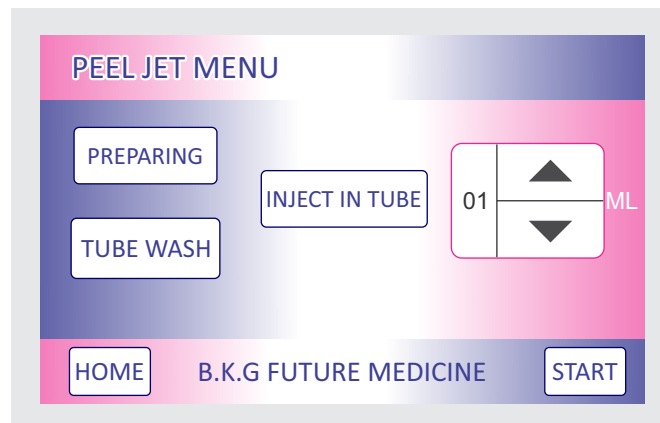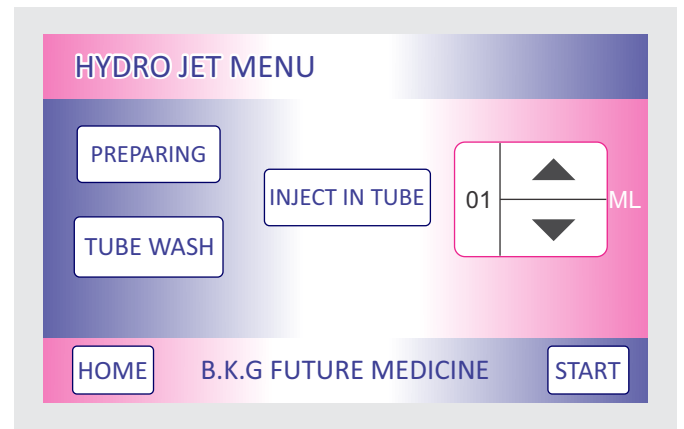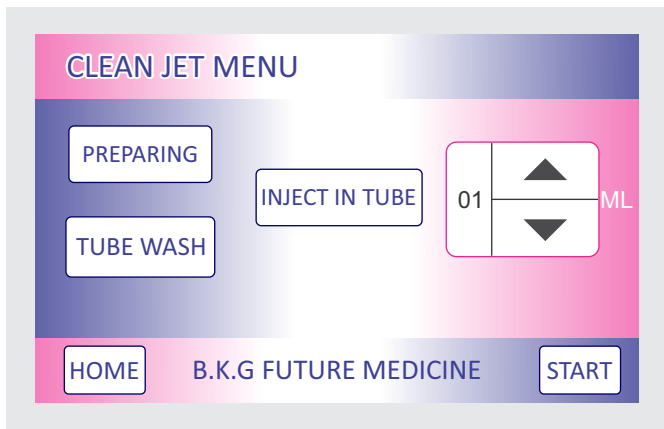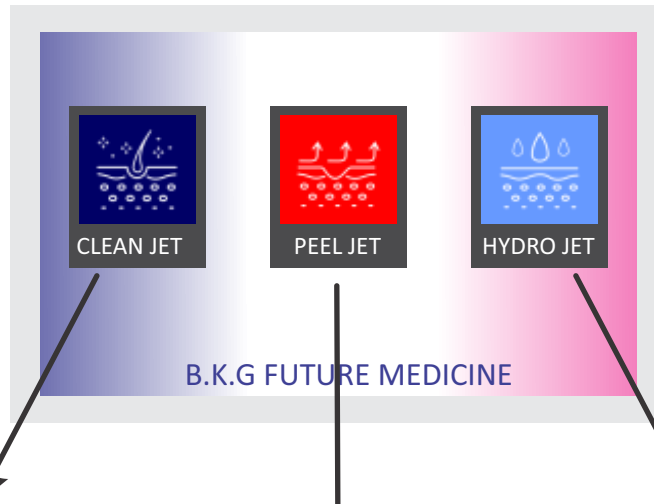

Deep-Cleansing Jetpeel Serum

— خواص:

سرم پاک کننده عمیق برای از بین بردن ناخالصی ها و باقی مانده آرایش از سراسر صورت، گردن و دکلته. به طور خاص برای استفاده در دستگاه توسعه یافته است.

— ویژگی های اصلی:

صورت، گردن و ناحیه دکلته را عمیقاً پاکسازی می کند، بدون تحریک، پوست را با حسی مطبوع و کاملاً تمیز می کند. پوست را تمیز می کند و باعث افزایش پذیرش پوست نسبت به مواد فعال درمان های حرفه ای می شود که بعداً اعمال می شود.

— چگونه کار می کند:

ترشحات چربی پوست را کاهش داده و آرایش را پاک می کند تا کاملاً ناحیه تحت درمان را پاکسازی کند و اثری از چربی از خود به جای نمی گذارد. و اپیدرم را متعادل می کند. پوست را برای استفاده از محصولات مراقبتی خاص آماده می کند.

— چه موقع باید استفاده کرد:

برای پاکسازی صورت، گردن و دکلته، اولین قدم در درمان حرفه ای با استفاده از دستگاه است این سرم منافذ را کاملاً تمیز کرده و پوست را برای درمان ویژه با دستگاه آماده می کند.

— نحوه استفاده:

۵ تا ۷ میلی لیتر لوسیون را در مخزن مخصوص آن بریزید و طبق دستورالعمل دستگاه مورد استفاده، پس از اتمام کار دستگاه، آن را با یک حوله (پنبه یا اسفنج) مرطوب شده در آب گرم بشویید. برای انواع پوست

— مواد تشکیل دهنده:

- عصاره بابونه
- عصاره لاوندر (اسطوخودوس)
- اسید سباسیک
- اسید لاکتیک
- اسید سالیسیلیک
- نیاسینامید

محلول شست و شو عمیق



Anti-spot Jetpeel Serum

— خواص:

کاهش هایپرپیگمانتاسیون و کراتوز باعث افزایش روشنایی و محافظت در برابر آسیب های خورشید می شود. کاهش هایپرپیگمانتاسیون یکنواخت رنگ پوست روشن کننده رنگ چهره مانند زره در برابر آلودگی و سایر رادیکال های آزاد عمل می کند.

— چگونه کار می کند:

سرم ضد لک حاوی ویتامین سی به صورت غلیظ و اسید آزالئیک و سایر اکتیوهای موثر قوی است که به طور ویژه برای استفاده در دستگاه طراحی و ساخته شده است.

— چه موقع باید استفاده کرد:

این مرحله دوم از درمان های حرفه ای صورت جت پیل است.

— نحوه استفاده:

این محصول برای استفاده حرفه ای طراحی و ساخته شده است. ۵ تا ۷ میلی لیتر لوسیون را در مخزن مخصوص آن بریزید و طبق دستورالعمل دستگاه مورد استفاده، پس از اتمام کار دستگاه، آن را با حوله (پنبه یا اسفنج) مرطوب شده در آب گرم بشویید.

مواد تشکیل دهنده کلیدی:

- رتینول
- کوجیک اسید
- ویتامین سی
- آربوتین
- نیاسینامید

سرم ضد لک



Deep Peeling Jetpeel Serum

— خواص:

لایه بردار فوق العاده قوی با فرمول ویژه مناسب برای انواع پوستی که نیاز به کاهش ضخامت لایه شاخی پوست و مبارزه با علائم پیری پوست دارند. ویژگی های اصلی لایه برداری نرم از سلول های مرده در لایه بالایی پوست را با کاهش ضخامت لایه شاخی پوست، برای کمک به مبارزه با علائم پیری و افزایش انعطاف پذیری پوست فراهم می کند.

— چگونه کار می کند:

لایه برداری لایه بالایی پوست را برای آزادسازی قرنیه سلول های آسیب دیده یا پیر در مرحله جدا شدن ایجاد می کند. آبرسانی پوست را بهبود می بخشد و تجدید سلولی را افزایش می دهد و یک عمل آنتی اکسیدانی انجام می دهد. این نفوذ را تسهیل می کند و حرکت مواد فعال را بهبود می بخشد.

— چه موقع باید استفاده کرد:

این مرحله لایه برداری از درمان های حرفه ای صورت است، در پوست هایی با علائم کم آبی، پوسته پوسته شدن، هایپریپیگمانتاسیون و پیری (چروک و عدم استحکام و / یا تراکم).

— نحوه استفاده:

این محصول برای استفاده حرفه ای طراحی و ساخته شده است. ۵ تا ۷ میلی لیتر لوسیون را در مخزن مخصوص آن بریزید و طبق دستورالعمل دستگاه مورد استفاده، پس از اتمام کار دستگاه، آن را با یک حوله (پنبه یا اسفنج) مرطوب شده در آب گرم بشویید.

— مواد تشکیل دهنده:

AHA

BHA

PHA

عصاره کالاندولا

اسید سالیسیلیک

رتینیل پالمیتات

سرم لایه بردار



Anti-Acne Jetpeel Serum

— خواص:

سرم ضد آکنه با کارایی بالا، جذب سریع، بافت فوق العاده سبک، فرموله شده با مواد فعال قوی برای پیشگیری و مبارزه با آکنه و التهاب و درمان کوتی باکتریوم. به طور خاص برای استفاده در توسعه یافته است سرم ضد آکنه حاوی اسید سالیسیلیک با اثرات ضد باکتریایی برای از دستگاہ بین بردن آکنه فعال، اسید رتینوئیک برای از بین بردن لکه ها و اسکارهای ناشی از آکنه است. روغن درخت چای، روغن درخت چای به عنوان یک ضد عفونی کننده طبیعی شناخته شده است. این روغن با نفوذ به پوست و تمیز کردن منافذ آن با خشک کردن جوش های سر سیاه، سر سفید و هر نوع آکنه دیگری، پوستی صاف و شفاف به شما می دهد. اسید آزالیک یک لایه بردار ملایم است که به عمق منافذ می رود و سلول های مرده پوست را که باعث تیرگی پوست و بسته شدن منافذ می شوند را از بین می برد. دارای خواص ضد باکتریایی است و به درمان التهاب و التیام برجستگی های قرمز ناشی از التهاب کمک می کند.

— چگونه کار می کند:

با از بین بردن باکتری هایی که باعث التهاب آکنه می شوند، عمل می کند. برخی دیگر چربی اضافی را از روی پوست پاک می کنند یا رشد سلول های جدید پوست و حذف سلول های مرده پوست را سرعت می بخشند.

— چه موقع باید استفاده کرد:

این مرحله سوم از درمان های حرفه ای صورت جت پیل است.

— نحوه استفاده:

این محصول برای استفاده حرفه ای طراحی و ساخته شده است. ۵ تا ۷ میلی لیتر لوسیون را در مخزن مخصوص آن بریزید و طبق دستورالعمل دستگاه مورد استفاده، پس از اتمام کار دستگاه، آن را با یک حوله (پنبه یا اسفنج) مرطوب شده در آب گرم بشوید.

— مواد تشکیل دهنده:

- کلیداسید استئاریک
- اسید آزالیک
- اسید گلیکولیک
- اسید سالیسیلیک
- اسید رتینوئیک
- روغن درخت چای

سرم ضد جوش



Hydrating Jetpeel Serum

— خواص:

سرم مرطوب کننده صورت با بافت سبک و نفوذ عالی. به طور خاص برای درمان و مراقبت از پوستی که علائم کم آبی، قرمزی، پوسته پوسته شدن و پیری زودرس را نشان می دهد، فرموله شده است.

— چه موقع باید استفاده کرد:

در ترمیم و ترمیم یا نهایی کردن مراحل درمان های حرفه ای جت پیل، از جمله مشاوره تشخیصی، در پوست های دارای علائم کم آبی، پوسته پوسته شدن، قرمزی و پیری زودرس.

— نحوه استفاده:

این محصول برای استفاده حرفه ای طراحی و ساخته شده است. ۵ تا ۷ میلی لیتر از لوسیون را در مخزن مخصوص آن بریزید و طبق دستورالعمل دستگاه مورد استفاده، پس از اتمام کار دستگاه، آن را با یک حوله (پنبه یا اسفنج) مرطوب شده در آب گرم بشویید.

— مواد تشکیل دهنده:

- روغن جوانه گندم
- ویتامین
- روغن جوجوبا
- هیالورونیک اسید
- آلوئه ورا E
- ویتامین
- کلاژن

سرم آبرسان



**HAPPY
ENDING :))**

Contact Us

Tell: 09126226687

WEB: www.bineshco.com

MAIL: info@bineshco.com